


ミスト付き電動鼻吸い器 NS13JP

取扱説明書

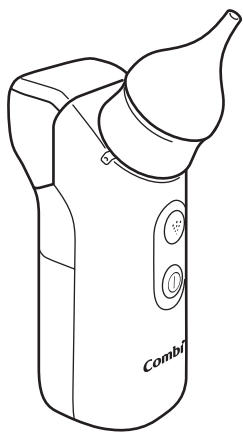

品質保証書付

対象月齢 0カ月～

お子さまの安全のために、ご使用前には必ず本書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

- 本書は製品本体と一緒に大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。
■ 取りはずしてある部品は、本書をよく読んで取り付けてください。

本製品について

本製品は鼻孔内の分泌物と粘液（鼻水）を取り除くための専用器です。
※本取扱説明書では、鼻孔内の分泌物と粘液を以下、「鼻水」と記載します。

安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は、お取り扱いを誤ると、お子さまや操作をしているかたに危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」の2つに区分して示しております。安全のため必ずお守りください。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

警告

- 本製品および各部品は、必ずお子さまの手が届かないところに保管してください。お子さまが自分で作動させようとしたり、危険な隙間に指を挟まないように注意してください。ケガなどと思われ事故の原因となります。
- 小部品がありますので部品の落とすなどを誤飲しないよう注意してください。万一、誤飲した場合は、ただちに医師に相談してください。
- お子さまに鼻の病気がある場合には、本製品を使用する前に医師に相談してから使用してください。
- 使用中に出血したり、お子さまが痛がる場合には、すぐに使用をやめ、ただちに医師に相談してください。
- 複数のかたが使用する場合は、そのつど洗浄し、消毒または除菌してから使用してください。細菌やウイルスに感染するおそれがあります。
- 本体から煙が出たり、異臭、異音がする場合は、すぐに使用を中止してコンシューマープラザまでお問い合わせください。
- 分解、修理、改造は行わないでください。
- ミストタンクに給水する場合は、薬液、アロマオイル、硬水、生理食塩水、ミネラルウォーター、水道から直接汲んだばかりでないきれいな、お湯を使用しないでください。雑菌などが発生したり、ミスト噴出口の詰まりの原因になります。
- 使用後は、吸引ノズル、吸引カップを速やかに洗浄し、しっかりと乾燥させてください。雑菌などが発生するおそれがあります。
- 本製品と他の機器を密着させたり、近づけて使用しないでください。[互いに電磁障害を引き起す恐れがあるため。]
- 携帯電話等移動無線周波数通信機器により本製品は影響を受けることがあるので30cm以上離してください。
- 本製品の付属品、および本製品の純正交換品以外は使用しないでください。[電磁障害を引き起す恐れや正常に作動しない恐れがあるため。]


⚠ 注意

- 本製品は鼻水を取りのぞくための専用器です。目的以外の用途では使用しないでください。
- 本製品は必ず大人が操作をしてください。お子さまが操作したり歩きながら操作しますとケガをするおそれがあります。
- 隣近で鼓膜がアンバランスになるのを防ぐために、吸引中はお子さまに息を止めさせたり、唾液を飲み込ませないようにしてください。
- 回まったり極度に粘度が高くなった鼻水は、そのまま吸引することはできません。
- 本体をオートクレープ滅菌しないでください。故障の原因となります。
- 本製品は防水型ではありませんので、本体、電池カバーを外した内部に液体を侵入させないでください。(ただし、吸引ユニット、ミストタンクユニットを除く)
- 連続での鼻水の吸引は 3 ～ 5 秒以内としてください。つどお子さまの鼻から離して様子をみながら、少しずつ吸引してください。
- 連続でのミスト噴霧は 10 秒以内としてください。お子さまの様子を見ながら少しずつ噴霧してください。
- 吸引は片側の鼻孔ずつ行ってください。
- 鼻孔内が乾燥した状態で吸引しないでください。
- 使用時に粘膜を傷つけないようにご注意ください。
- 吸引ノズルを鼻孔内に無理やり入れないでください。
- 吸引ノズルの先端を鼻孔内の粘膜に直接押し当ててふさぐことがないようにしてください。うまく吸引できないばかりか吸引力が上昇し危険です。
- ミスト噴出口を鼻孔の入り口に近づけすぎたり直接押し当てないでください。
- 吸引カップに鼻水を溜めないで、こまめに捨ててください。吸引カップに刻印された「MAX」マークを超えないようにしてください。吸引カップの容量を超えて吸引を続けると、吸引ノズルや本体の空気穴から鼻水が漏れてくる場合があります。
- 鼻水吸引中に吸引ボタンを Off にする場合は、本体を立てた状態で操作してください。
- 鼻水吸引中に吸引ボタンを Off にすると、吸引ノズルの角度や鼻水の粘度によっては吸引した鼻水が漏れてくることがあります。
- 鼻水吸引中に吸引ノズルの角度や鼻水の粘度によっては吸引ノズルや空気穴から、鼻水が漏れてくることがあります。
- 鼻水が漏れてくる場合は、本体の角度を起こしてご使用ください。
- ミストユニットに水を入れたまま逆さまにすると、水が漏れてくる場合があります。
- 本製品の洗浄・消毒または除菌は取扱説明書の「お手入れ方法」に従ってください。
- 本体を水洗いしたり、電池カバーをはずした状態で水などをかけないでください。
- 本製品および各部品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品および各部品は火気の近くや車内など高温になる場所、直射日光のあたる場所、振動衝撃を受けやすい場所での放置や使用はしないでください。故障や変形の原因となります。
- 浴室など高温多湿な場所での使用・放置・保管はしないでください。故障の原因になります。
- 電子レンジ、食器乾燥機、ドライヤーで部品を乾燥させないでください。
- 磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置)、コンピュータ断层撮影装置 (CT 装置)、電気手術器等とは併用しないでください。[MRI 装置への本装置の吸着、その他、妨害波により動作しない恐れがあるため。]
- 可燃ガス雰囲気内、高圧酸素室内、酸素 Tent 内等では使用しないでください。(火災やけがの恐れがあります。)

電池の使いかたを間違えますと、漏液、発熱、破裂のおそれがあり、ケガや事故、故障などの原因となりますので以下のことを必ずお守りください。

- 電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みの上、ご使用ください。
- 電池の＋（プラス）、マイナス）極を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり、充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池は、使用しないでください。
- 使い切った電池はすぐに取りはずしてください。
- アルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池、二次電池（充電式電池）、ニッケル系電池（オキシライド乾電池）などは使用しないでください。
- 外装ラベルがはがれたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合には、電池を取りはずしてください。
- 電源スイッチを入れたまま、電池の交換はしないでください。
- 使用済みの電池は地域の収集・回収方法に従い、処分してください。
- 電池から漏れた液体が目・皮膚についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診断・治療を受けてください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保管はしないでください。
- 電池はお子さまの手の届かないところに保管してください。万が一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断・治療を受けてください。
- 電池の入れ替えは、お子さまの手の届かないところで、大人のかたが行ってください。

各部のなまえ

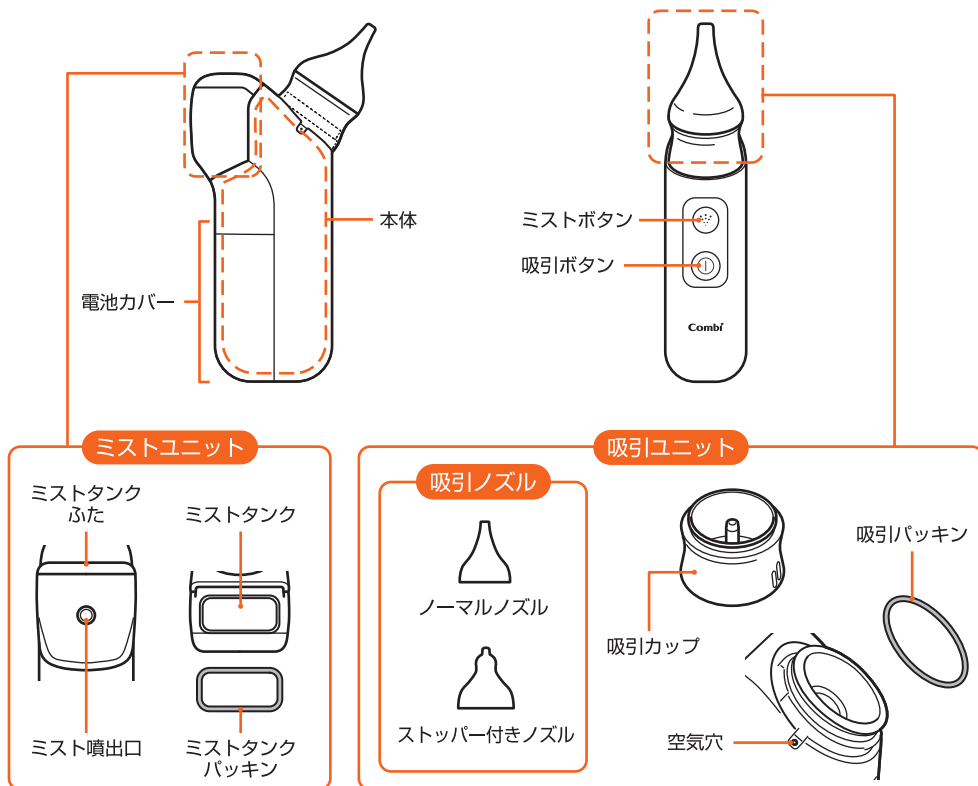

仕 様

販売名	ミスト付き電動鼻吸引器 NS13JP
一般的名称	電動式可搬型吸引器
医療機器分類	管理医療機器
認証番号	306AFBZX00054000
類別	機械器具 32 医療用吸引器
電撃に対する保護の形式・程度	内部電源機器・BF 形装着部
電源	単 4 形アルカリ乾電池 2 本
電源電圧	DC3V
吸引圧	-65kPa±15%（電池の残量によって多少の変化があります）
吸引ポンプの排気流量	2.0L/min±20%（電池の残量によって多少の変化があります）
吸引カップ容量	5mL
使用環境条件	16～35℃ 15%～85%RH（結露していない）
保管輸送時環境条件	-25～55℃ 15%～85%RH（結露していない）
製品寸法	42×77×149[mm]（ノーマルノズル含む）
本体質量	156g（電池なし、ノーマルノズル付き）
対象年齢	0 ヶ月～
耐用期間	3 年
付属品	吸引ノズル 2 種、取扱説明書、添付文書

- 製造販売元
株式会社八森電子デバイス
〒018-2643
秋田県山本郡八峰町八森字
家ノ上 166 番地の2

- 発売元
コンビ株式会社
〒111-0041
東京都台東区元浅草 2-6-7

【噴霧のしくみ】 超音波でミストタンク内の水を振動させ、メッシュ（微細な孔）を通過することにより霧状にして噴霧します。


適合基準

EMC適合 本製品は EMC 規格 IEC 60601-1-2 : 2014 + AMD1 : 2020 に適合しています。

電池の入れかた

電池が消耗すると、電源を入れた際、吸引の動作が不安定になります。新しい電池と交換してください。電源が切れていることを確認してから、電池交換をしてください。

- 1 電池カバーは本体裏面にあります。
本体をしっかり持ち、もう片方の手で電池カバーを持ってくぼみを押しながら矢印方向にスライドしてははずす。
- 2 図のように、新しい単 4 形アルカリ乾電池 2 本を電池ケース内部の表示にあわせて正しく入れる。
- 3 電池カバーを元の位置にあわせ、矢印の方向にスライドして完全に閉じる。

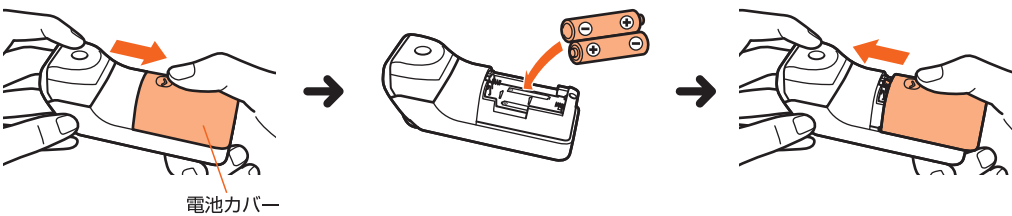

ご使用方法

ミスト噴霧

⚠ 警告 使用できるのは新しい水道水、浄水器の水のみです。薬液、アロマオイル、硬水、生理食塩水、ミネラルウォーター、水道から汲んだばかりでない古い水、お湯を使用しないでください。

- 1 ミストタンクふたを開けてミストタンクに水を入れる。

- ⚠ 注意** 水はミストタンク横の MAX マークを超えないように少しずつ入れてください。

- 2** ミストタンクふたを取り付ける。


- ⚠ 注意** ミストタンクパッキンが正しく装着されていることを確認の上、しっかりと閉めてください。

- ### 3 ミストボタンを押す（ミストユニットが作動する）

ミスト噴出口からすぐにミストが出ます。
噴霧中にミストボタンをもう一度押すと、ミスト噴霧が停止します。
(操作をしなれば約 10 秒で自動的に停止します)

ワンポイント

- ミスト噴出口とお子さまの鼻孔のちょうどよい距離を把握するため、最初にご使用になる前に、ミストの噴霧量を確認しておくことをおすすめします。

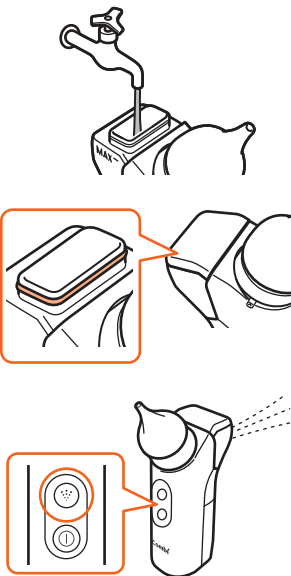

4 お子さまの鼻孔にミストがあたるように離して噴霧する。

ミスト噴霧時は、本製品を立てて使用してください。連続でのミスト噴霧は10秒以内としてください。

注意

ミスト噴出口とお子さまの距離が近すぎたり、長時間噴霧するとむせたり嫌がったりすることがあります。つどお子さまの様子を見ながら噴霧距離を調整してください。また、長時間使用するとお子さまの顔や服が濡れることがあります。顔や服にかかる水滴や垂れた鼻水は、タオルやハンカチでふき取りながら使用してください。



5 ミストタンクが空になったら水をたす。

注意


水が入っていない状態で動作させると電池寿命が短くなります。

鼻水の吸引

1 吸引ノズル、吸引カップが本体に隙間なく正しく装着されていることを確認する。

注意


誤って取り付けられていると正常な吸引ができなかったり、鼻水が漏れてくる場合があります。

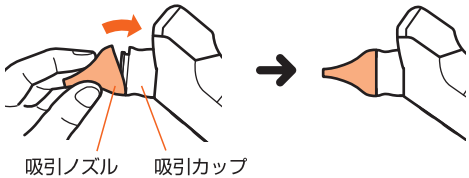

2 吸引ボタンを押す（吸引ユニットが作動する）

注意

吸引ノズルの先端を無理に挿入しないでください。お子さまが嫌がる場合があります。

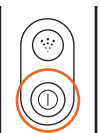


3 吸引ノズルをお子さまの鼻水に接触させ吸引する。

ワンポイント

鼻水吸引中に吸引ボタンをOffにする場合は、本体を立てた状態で操作してください。


また、鼻水吸引中に吸引ノズルの角度や鼻水の粘度によっては吸引した鼻水が漏れてくる場合があります。鼻水が漏れてくる場合は、本体の角度を起こしてご使用ください。

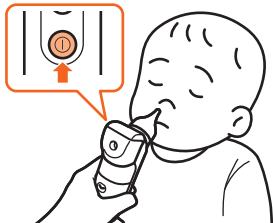

4 1回の吸引は3～5秒以内とし、つどお子さまの鼻から離して様子を見ながらこまめに吸引する。

吸引カップのMAXマークを超えそうな場合は、中断して洗浄してください。

吸引カップの容量を超えて吸引を続けると、吸引ノズルや本体の空気穴から鼻水が漏れてくる場合があります。

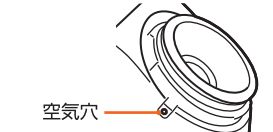

5 吸引ボタンをもう一度押し、停止させる。

吸引は約60秒で自動的に止まります。

ワンポイント

ノズルの使い分けかた



ノーマルノズル

鼻孔内や鼻孔から出てきた鼻水を吸引するときにご使用ください。



ストッパー付きノズル

新生児に使用する場合は、操作者が初めて使用する場合は、鼻孔の奥に入りにくいストッパー付きノズルをご使用ください。

お手入れ方法

使用後は、必ず吸引ノズル、吸引カップを洗浄してください。


ミストユニットのお手入れ方法

1 ふたを外し、ミストタンク内に残っている水を捨てる。

ミストタンク内を水道水ですすいだ後は、よく乾燥させる。水分が残る場合は、綿棒などを使用してしっかりとふき取る。

注意

使用後の水をそのままにすると雑菌などが発生する恐れがあります。

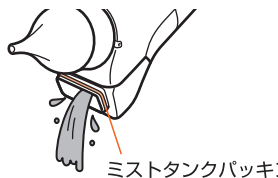


2 ミストタンクの表面は乾いた布などでふく。

3 ミスト噴出口の汚れが気になる場合は、アルコールをつけた綿棒などでやさしくふく。

アルコール使用後はよく乾燥させる。

ワンポイント

汚れが気になる場合、ミストタンクパッキンもはすして洗うことができます。

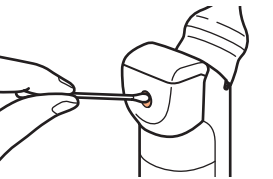


吸引ユニットのお手入れ方法

部品のはすしかた

1 吸引ノズルを吸引カップからはすす。

注意

溜まった鼻水が飛散しないよう注意してはすしてください。鼻水が飛散し手や物についた場合は除菌することをおすすめします。

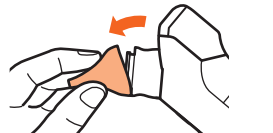

2 本体を支えながら吸引カップを持ち、矢印方向に回してはすす。

吸引カップ

ママーク


ロックマーク

ワンポイント

汚れが気になる場合、吸引パッキンもはすして洗うことができます。吸引パッキンがはすしにくい場合は、つまようじなどの先の細いものを隙間に入れてはすしてください。先の細いもので吸引パッキンを切らないようにしてください。

つまようじ

吸引パッキン

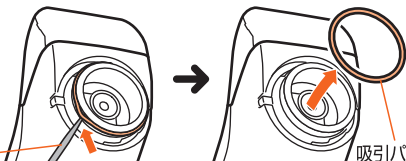

注意

取りはすし時、洗浄時、各種パッキンをなくさないようにしてください。吸引パッキンがない状態で吸引をすると、空気が漏れてしまい、正常な吸引力が得られません。各種パッキンを取り付ける際には、ねじれないよう注意をしてください。部品と吸引パッキンの間にすき間がある状態で吸引をすると、空気が漏れてしまい、正常な吸引力が得られません。

部品の洗浄方法


1 はすした部品（吸引ノズル・吸引カップ、ミストタンクふた、ミストタンクパッキン）、吸引パッキンを水道水またはぬるま湯、中性洗剤でよく洗う。各部品の凹凸部分もしっかりと洗う。

2 洗浄後は水分をよくふき取り、しっかりと乾燥させる。水分が残る場合は、綿棒などを使ってふく。

3 再度組み立てる際は、「部品のはすしかた」の逆の手順にて組み立てる。

吸引カップはしっかりとロックされていることを確認する。

ママークとロックマークの位置がぴたり合い、カチッと音になるまでしっかりと締めてください。

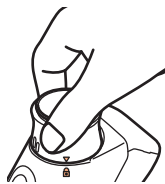

詳しくは 部品のはすしかた をご覧ください。

本体側に鼻水を吸引してしまった場合

注意

本製品は日常的に本体内部を洗浄することを想定しておりません。そのため使用時には本体内部に鼻水が入らないように注意してください。

1 吸引カップ、吸引ノズルをはすし、洗浄した後、再度本体に取り付けてください。


2 吸引ノズルの先端を水道水またはぬるま湯につけ、そのまま吸引ボタンを押し、吸引ノズルに水を吸わせる。

注意

吸った鼻水や水が本体空気穴から排出されます。吸った鼻水や水が周りに飛び散らないように、指や布などで水流を抑えてください。飛び出た水で、衣服等が汚れないように注意してください。

3 吸引が止まったら、吸引ノズルの先端を水面から出し、吸引ボタンを数回押して、本体の中にたまった水分が出なくなり、ゴボゴボと本体から異音が出なくなるまで吐き出す。（最後に水分を出し切るために本体を振ると効果的です。）粘り気強い鼻水は一度で洗浄できないことがあるため、1～2を繰り返す。

4 洗浄後は吸引ユニットを外し、吸引口及び空気穴を乾いた布などでふく。空気穴に水が残っている場合、空気穴を下にして寝かせて乾燥させる。

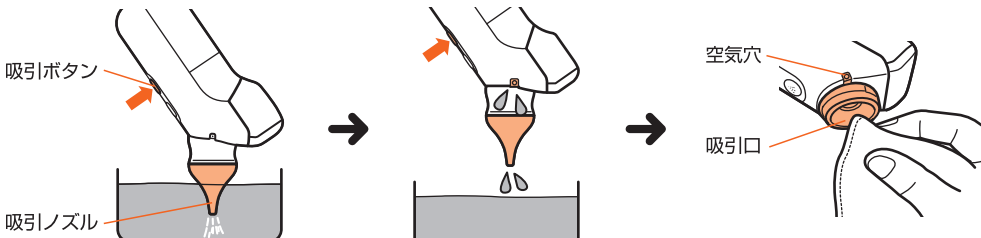

消毒・除菌について

部品名	材料の種類	耐熱温度	消毒・除菌方法		
			煮沸	電子レンジ	薬液
吸引ノズル	シリコンゴム	135℃	○	○	○
吸引カップ	PCTG	110℃	×	×	×
パッキン（2種）	シリコンゴム	135℃	×	×	×

吸引ノズルのみ消毒・除菌が可能です。

- 煮沸の際は、たっぷりのお湯を沸騰させた鍋に2～3分間入れ、煮沸してください。
- 電子レンジ除菌の際は、哺乳用品用の除菌用具をご使用ください。詳しくは、各用具の使用方法に従ってください。
- 薬液消毒・除菌の際は、家庭用向け哺乳用品用の用具や薬剤などをご使用ください。詳しくは、各用具や薬剤などの使用方法に従ってください。

注意

- 3分以上煮沸しないでください。過度の煮沸は製品を早く傷めます。
- 少ないお湯や小さい鍋で煮沸すると、吸引ノズルが鍋肌に密着して変形するおそれがあります。
- 長時間薬液に浸したり、薬液の濃度が濃いことと製品が劣化することがあります。
- 電子レンジ除菌および煮沸消毒後は、吸引ノズルが高温になります。ヤケドに注意してください。

品質保証書		ミスト付き電動鼻吸い器 NS13JP	
本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザ、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。			
保証規定			
1. 1度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。		(d) 本書に製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。	
2. 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザにお送りください。		(e) 本書のご提示がない場合。	
3. 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。		(f) 一般家庭以外で、業務用などにご使用され故障した場合。	
(a) プラスチック部品の自然劣化による変色。		(g) 有料修理の場合に要する発送運賃。	
(b) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。		4. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしかねます。	
(c) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。		5. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。	
製品名	ロットNo.	保証期間	お買い上げ日より1年間（ただし保証規定による）
お客様	お名前	お買い上げ日	年 月 日
ご住所	〒	TEL	
販売店	店名	TEL	
住所	住所		
修理メモ		●お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちにご記入願います。	
		●領収書（レシート）を本書といっしょに保管してください。	
		●万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。	
		●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザ、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。	
		●品質保証書にご記入いただいた個人情報、故障・修理の確認、修理品の発送にのみ利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。	

コンビ株式会社

ホームページ

オンラインストア（部品購入窓口）

combi.co.jp

combi.co.jp/store

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間：9:30～17:00（土日祝日、年末年始を除く）
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

*コンシューマープラザホームページ combi.co.jp/soudan